

# Instrukcja użytkowania

## Fantom Pielęgnacyjny- Oparzenia



Praktyczny, kompaktowy fantom do nauki czynności medycznych. Jest to silikonowa postać w formie głowy + ciała stworzona do przeprowadzania podstawowych szkoleń z opatrywania ran, urazów i oparzeń wśród dużych grup kursantów. W manekinie uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej osoby i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

### Cechy produktu

- Realistyczne kształt, rozmiar i wygląd fantomu
- Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni
- Możliwość ćwiczeń iniekcji i wkłuć na fantomie
- Realistyczne ruchy głowy, klatki piersiowej, kończyn, tułowia
- Bardzo wytrzymały - mogą na nim ćwiczyć silne osoby o dużej masie bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji manekina
- Łatwy w myciu i dezynfekcji
- Anatomiczna budowa ciała i realistyczne rysy twarzy

### Fantom umożliwia ćwiczenie takich czynności jak:

- opatrywanie ran po amputacji nogi i ręki
- opatrywanie odleżyn
- opatrywanie owrzodzeń infekcyjnych ud
- opatrywanie miejsc szycia skóry
- opatrywanie otwartych złamań kości
- uraz szczęki
- cewnikowani
- nakłucia żyłne
- tracheotomia
- intubacja
- odsysanie plwocin
- inhalacja tlenem

## Czyszczenie

Skóra musi być czyszczona w odpowiedni sposób.

Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu (np. Formuła 409, Windex, Vim). Zaleca się stosowanie tych środków z rozwagą uważając na to by zbytnio nie trzeć powierzchni skóry jako, że może dojść do jej uszkodzenia

## Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.

ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 5272774698

tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu