

Instrukcja użytkowania

Fantom pielęgnacyjny jedнопłciowy- funkcja RKO



Praktyczny, kompaktowy fantom do nauki czynności medycznych.

Jest to dmuchana postać w formie głowy + ciała stworzona do przeprowadzania podstawowych szkoleń z zakresu reanimacji wśród dużych grup kursantów. W manekinie uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia.

Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej osoby i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

Cechy produktu

- Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy)
- Realistyczne kształt, rozmiar i wygląd fantomu
- Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania
- Wentylacja bezprzyrządową metodą usta-usta lub usta-nos
- Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku
- Możliwość ćwiczeń iniekcji i wkłuć na fantomie
- Specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej
- Szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej
- Realistyczne ruchy głowy, klatki piersiowej, kończyn, tułowia
- Kształt ust ułatwiający stosowanie maseczki do RKO i wydmuchiwanie powietrza
- Bardzo wytrzymały - mogą na nim ćwiczyć silne osoby o dużej masie bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji manekina
- Łatwy w myciu i dezynfekcji
- Anatomiczna budowa ciała i realistyczne rysy twarzy

Czyszczenie

- Skóra twarzy, kończyn i torsu fantomu została wykonana z tego samego materiału i musi być czyszczona w odpowiedni sposób
- Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu wody i mydła
Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu (np. Formuła 409, Windex, Vim). Zaleca się stosowanie tych środków z rozwagą uważając na to by zbytnio nie trzeć powierzchni skóry jako, że może dojść do jej uszkodzenia
- Skórę twarzy można przetrzeć ściereczką nasączoną alkoholem lub na 10 minut zanurzyć w roztworze 1/4 szklanki wybielacza i ok. 4 litrów wody
- Skóra twarzy fantomu może być oczyszczona przed kolejnym zastosowaniem przez następną osobę przy pomocy ściereczek nasączonych alkoholem co zwiększa bezpieczeństwo stosowania fantomu

Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 5272774698
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu