

# Instrukcja użytkowania

## Fantom pielęgnacyjny obupłciowy- funkcja RKO



Praktyczny, kompaktowy fantom do nauki czynności medycznych.

Jest to dmuchana postać w formie głowy + ciała stworzona do przeprowadzania podstawowych szkoleń z zakresu reanimacji wśród dużych grup kursantów. W manekinie uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia.

Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej osoby i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

### Cechy produktu

- Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy)
- Realistyczne kształt, rozmiar i wygląd fantomu
- Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania
- Wentylacja bezprzyrządową metodą usta-usta lub usta-nos
- Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku
- Możliwość ćwiczeń iniekcji i wkłuć na fantomie
- Specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej
- Szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej
- Realistyczne ruchy głowy, klatki piersiowej, kończyn, tułowia
- Kształt ust ułatwiający stosowanie maseczki do RKO i wydmuchiwanie powietrza
- Bardzo wytrzymały - mogą na nim ćwiczyć silne osoby o dużej masie bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji manekina
- Łatwy w myciu i dezynfekcji
- Anatomiczna budowa ciała i realistyczne rysy twarzy

## Czyszczenie

- Skóra twarzy, kończyn, torsu i narządów wewnętrznych fantomu została wykonana z tego samego materiału i musi być czyszczona w ten sam sposób.
- Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu (np. Formuła 409, Windex, Vim). Zaleca się stosowanie tych środków z rozwagą uważając na to by zbyt nie trzeć powierzchni skóry jako, że może dojść do jej uszkodzenia.
- Skórę twarzy można przetrzeć ściereczką nasączoną alkoholem lub na 10 minut zanurzyć w roztworze 1/4 szklanki wybielacza i ok 4 litrów wody.
- Skóra twarzy fantomu może być oczyszczona przed kolejnym zastosowaniem przez następną osobę przy pomocy ściereczek nasączonych alkoholem co zwiększa bezpieczeństwo stosowania fantomu.
- W celu utrzymania czystości wnętrza fantomu należy czyścić każdy narząd wewnętrzny osobną ściereczką przy użyciu tych samych środków czystości

## Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 5272774698  
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu