

Instrukcja użytkowania

Fantom RKO- Dziecko



Model 9 miesięcznego niemowlęcia umożliwia ćwiczenie sytuacji wymagających zastosowania resuscytacji krążeniowo - oddechowej niemowląt oraz technik usuwania ciała obcego z dróg oddechowych. Model dostarczany z ubrankiem.

Cechy produktu

- Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),
- Realistyczne rysy twarzy, ruchoma żuchwa i kończyny.
- Widoczne i wyczuwalne żebra niemowlęcia.
- Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania.
- Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej.
- Funkcja nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia.
- Szybkie i wygodne wymienianie dróg oddechowych i części twarzowych.

Czyszczenie

- Skóra twarzy, kończyn i torsu fantomu została wykonana z tego samego materiału i musi być czyszczona w ten sam sposób
- Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu (np. Formuła 409, Windex, Vim). Zaleca się stosowanie tych środków z rozwagą uważając na to by zbytnio nie trzeć powierzchni skóry jako, że może dojść do jej uszkodzenia.
- Skórę twarzy można przetrzeć ściereczką nasączoną alkoholem lub na 10 minut zanurzyć w roztworze 1/4 szklanki wybielacza i ok 4 litrów wody.
- Skóra twarzy fantomu może być oczyszczona przed kolejnym zastosowaniem przez następną osobę przy pomocy ściereczek nasączonych alkoholem co zwiększa bezpieczeństwo stosowania fantomu.

Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 5272774698
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu