

Instrukcja użytkowania

Pośladek do zastrzyków



- Symulator umożliwia ćwiczenie trzech sposobów iniekcji domięśniowych w pośladek. Model wykonany jest z żywicy, która umożliwia wielokrotne wstrzykiwanie bez pozostawiania śladu.
1. Model umożliwia ćwiczenie 3 metod: Clark'a, Hohashtayter'a, metoda wyznaczania ćwiartki.
 2. Symulator posiada punkty orientacyjne takie jak: krętarz większy, przedni górny kolec biodrowy, tylny górny kolec biodrowy.
 3. Skórę i mięśnie można wymienić.

Czyszczenie

Skóra fantomu została wykonana z materiału przypominającego skórę i musi być czyszczona w odpowiedni sposób. Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu (np. Formuła 409, Windex, Vim). Zaleca się stosowanie tych środków z rozwagą uważając na to by zbyt nie trzeć powierzchni skóry jako, że może dojść do jej uszkodzenia. - Skórę twarzy można przetrzeć ściereczką nasączoną alkoholem lub na 10 minut zanurzyć w roztworze 1/4 szklanki wybielacza i ok 4 litrów wody.

Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 5272774698
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu