

# Instrukcja użytkowania

## Skóra do zastrzyków



Trenażer przeznaczony jest do symulacji iniekcji domięśniowych, śródskórnych, podskórnych i typu Z-track. Możliwości chwycenia fałdu skóry oraz obecności drenażu umożliwiającego wykonanie iniekcji z użyciem płynu.

Trenażer przeznaczony jest do symulacji iniekcji domięśniowych, śródskórnych (w przypadku stosowania wymiennej warstwy naskórka), podskórnych i typu Z-track. Odczucie oporu materiału

na przebicie oraz możliwość chwycenia fałdu skóry urzeczywistniają iniekcję. Drenaż umieszczony

na spodzie trenażera umożliwia wykonywanie iniekcji z użyciem płynu.

Rozwijanie umiejętności:

Nauka wykonywania iniekcji domięśniowych, śródskórnych, podskórnych i typu Z-track

Funkcje / cechy:

- realistyczny opór podczas przebicia
- możliwość chwycenia fałdu skóry
- drenaż umożliwia wykonanie iniekcji z użyciem płynu

## Czyszczenie

Skóra fantomu została wykonana z materiału przypominającego skórę i musi być czyszczona w odpowiedni sposób. Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu (np. Formuła 409, Windex, Vim). Zaleca się stosowanie tych środków z rozwagą uważając na to by zbyt nie trzeć powierzchni skóry jako, że może dojść do jej uszkodzenia.

Skórę twarzy można przetrzeć ściereczką nasączoną alkoholem lub na 10 minut zanurzyć w roztworze 1/4 szklanki wybielacza i ok 4 litrów wody.

## Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.

ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 5272774698

tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu