


Instrukcja użytkowania

Fantom do nauki cewnikowania- kobieta

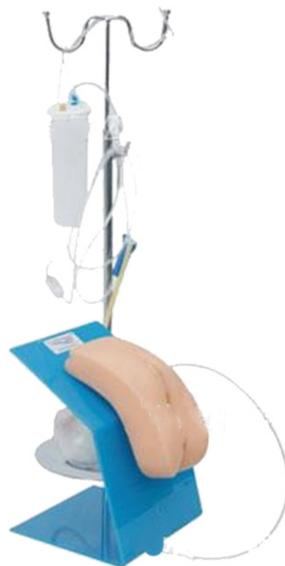

Wysokiej jakości symulator do nauki katetyzacji pęcherza moczowego. Przedstawia kobiecą miednicę wraz z genitaliami oraz proksymalnymi fragmentami ud. Stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych zapewniając wysoką jakość i realizm podczas nauki i doskonalenia umiejętności cewnikowania.

Cechy produktu

Zachowana prawidłowa, anatomiczna pozycja pęcherza moczowego i genitaliów. Innowacyjny pęcherz został zaprojektowany tak aby zapewnić prawidłową, anatomiczną i nieprzerwaną drogę cewki moczowej od ujścia do szyjki pęcherza. Obie wkładki płciowe są wykonane z trwałych materiałów przypominających ludzkie tkanki. Kształt pęcherza został specjalnie zaprojektowany tak aby uniknąć nierealistycznego oporu, który występuje w istniejących, podobnych tego typu symulatorach, dostępnych na rynku. Trenażer umożliwia także naukę palpacji tylnej części pęcherza w celu prawidłowej oceny głębokości zakładania cewnika. Nowy rodzaj zaworu, który zapobiega nierealistycznemu oporowi podczas zakładania cewki do pęcherza. Pęcherz jest transparentny co umożliwia studentom obserwację położenia i głębokości cewnika. Pęcherz łatwo łączy się z workiem na płyn, który zapewnia "naturalny przepływ" moczu po prawidłowo wykonanym zabiegu cewnikowania.

Wkładka żeńskich genitaliów

Realistyczne, elastyczne wargi sromowe, w celu doskonalenia umiejętności zlokalizowania ujścia cewki moczowej. Element ten został zaprojektowany tak aby ujście cewki moczowej nie było łatwo dostępne, umożliwiając nieskuteczne cewnikowanie. Cewka moczowa generuje bardzo realistyczny opór podczas zakładania cewnika.

Czyszczenie

Skóra fantomu została wykonana z materiału przypominającego skórę i musi być czyszczona w odpowiedni sposób. Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu (np. Formuła 409, Windex, Vim). Zaleca się stosowanie tych środków z rozwagą uważając na to by zbytnio nie trzeć powierzchni skóry jako, że może dojść do jej uszkodzenia. - Skórę można przetrzeć ściereczką nasączoną alkoholem lub na 10 minut zanurzyć w roztworze 1/4 szklanki wybielacza i ok 4 litrów wody.

Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 5272774698
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu