

Instrukcja użytkowania

Symulator iniekcji domięśniowych



Model pośladków z realistyczną skórą wykonany z materiału PCV. Służy do nauczania odpowiednich technik iniekcji – unikania nerwów i żył. Przezroczysta strona modelu pokazuje wewnętrzną strukturę, w tym kości, mięśnie, nerwy i żyły. Środek pośladkowy, nerwy, żyły, ilium crista i większy trochanter mogą być palpowane, aby potwierdzić prawidłowe punkty wstrzyknięcia. Płyn wstrzykiwany we właściwym miejscu jest odprowadzany przez rurkę spustową do torby do odsączania. Zielone światło wskazuje prawidłową technikę wtrysku i pozycjonowanie, natomiast brzęczyk i migające czerwone światło ostrzegają uczniów, że wkłuli się zbyt głęboko lub pozycja igły jest nieprawidłowa.

Model zasilany jest przy użyciu baterii 6LR61, którą należy umieścić w metalowej komorze, zabezpieczyć dwoma śrubami. Obok komory znajdują się czerwony guzik, który służy do włączania i wyłączenia zasilanej elektrycznie części fantomu – lampek oraz brzęczyka. Należy wprowadzać igłę w odpowiednie miejsca, ćwicząc iniekcję domięśniową. Po zakończeniu ćwiczeń należy wyłączyć fantom. Fantom należy czyścić przy użyciu wody i mydła.

Model należy użytkować i przechowywać z daleka od źródeł wody. Nie należy ingerować w jego konstrukcję. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Nie używać w przypadku uszkodzenia.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu