

Instrukcja użytkowania

Myjka ultradźwiękowa



Technologia mycia/sterylizacji za pomocą ultradźwięków zapewnia szybkie i dokładne czyszczenie nawet najbardziej opornych kształtów. Dzięki zjawisku kawitacji polegającemu na wytworzeniu w roztworze myjącym dużej ilości fal ciśnieniowych wywołanych przez implodujące pod wpływem ultradźwięków pęcherzyki powietrza, zanieczyszczenia z łatwością odrywają się od każdej powierzchni. Ta metoda czyszczenia pozwala zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym czyszczonych przedmiotów, a zarazem osiągnąć ich nieskazitelną czystość. Pojemnik na płyn do myjki ultradźwiękowej mieści 600 ml płynu.

1. Przed pierwszym użyciem myjki ultradźwiękowej, należy dokładnie ją umyć i wysuszyć
2. Umieść naczynia lub przedmioty do czyszczenia w myjce.
3. Wlej odpowiednią ilość detergentu do zbiornika na płyn.
4. Włącz myjkę ultradźwiękową i ustaw odpowiedni czas i moc czyszczenia.
5. Po zakończeniu cyklu czyszczenia, wyjmij naczynia lub przedmioty z myjki i dokładnie je wypłucz i osusz.
6. Po każdym użyciu, dokładnie umyj i wysusz myjkę ultradźwiękową.
7. Nie należy umieszczać w myjce metalowych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
8. Nie należy przekraczać poziomu linii max w zbiorniku na płyn.
9. Nie używać zbyt dużej ilości detergentu, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie czystych przedmiotów.
10. Regularnie kontrolować i czyścić filtr myjki ultradźwiękowej, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem bądź przy pomocy ściereczki nasączonej alkoholem. Środek myjki należy przetrzeć wilgotną ściereczką, natomiast sitko opłukać pod bieżącą wodą.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu