

## Instrukcja użytkowania

### Mikrosilnik stomatologiczny



#### **Uwaga!**

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w połączeniu z treningowymi turbinami i kątnicami dla przyszłych stomatologów w ramach ćwiczeń na fantomach stomatologicznych.

#### **Konserwacja**

Przyłącz rurkę z silnika. Wlej trochę smaru do rurki na dole. Posmaruj po każdym użyciu po 2 krople na otwór.

#### **Instrukcja obsługi**

1. Sprawdź czy urządzenie nie jest uszkodzone. (Nie używaj, jeśli jest.)
2. Wkręć treningową kątnicę lub turbinę do ćwiczeń na gwint mikrosilnika przy pomocy dołączonego klucza.
3. W celu wymiany kątницы bądź turbiny, należy odkręcić ją od mikrosilnika przy pomocy klucza.
4. Ćwicz tylko na fantomach stomatologicznych, po użyciu przechowuj w miejscu suchym.

#### **Parametry:**

Moc: 20-45W

Napięcie: 230V

Średnica gwintu:  $\varnothing$  2.334-2.335 mm

Poziom hałasu:  $\leq$  60 dB.

Prędkość obrotowa: 14.000-20.000 obr./min

#### **Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu