

Instrukcja użytkowania

Autoklaw



Autoklaw to urządzenie do suchej sterylizacji promieniami UV-C o prostej konstrukcji i niewielkich gabarytach. Nie wymaga stosowania roztworów chemicznych, co oznacza brak chemicznych pozostałości na narzędziach. Dezynfekcja jest skuteczna, gdy promienie UV-C padają bezpośrednio na przedmiot.

Światło UV-C zabija bakterie i zarazki, niszcząc ich DNA i RNA i jest szeroko stosowane do dezynfekcji m.in. w szpitalach, przychodniach, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu.

Wymiary: 40.5x28.5x27.5 cm.

Instrukcja:

1. Przygotowanie sterylizatora:

- A) Upewnij się, że sterylizator jest podłączony do źródła zasilania i włączony.
- B) Otwórz sterylizator i sprawdź, czy komora sterylizacyjna jest czysta i sucha.
- C) W przypadku potrzeby, przetrzyj wnętrze sterylizatora suchą i czystą ściereczką.

2. Przygotowanie przedmiotów do sterylizacji:

- A) Upewnij się, że przedmioty przeznaczone do sterylizacji są odpowiednio przygotowane.
- B) Przedmioty powinny być dokładnie wyczyszczone i odkażone przed umieszczeniem w sterylizatorze.
- C) Należy umieścić tylko przedmioty przeznaczone do sterylizacji w sterylizatorze.

3. Sterylizacja:

- A) Umieść pojemniki lub worki sterylizacyjne z przedmiotami w komorze sterylizacyjnej.
- B) Zamknij sterylizator i uruchom program sterylizacyjny, a następnie poczekaj na zakończenie cyklu sterylizacji.
- C) Po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego, wyłącz sterylizator i poczekaj, aż ostygnie.

4. Usuwanie przedmiotów ze sterylizatora:

- A) Otwórz pokrywę sterylizatora i usuń pojemniki lub worki sterylizacyjne z przedmiotami.
- B) Uważaj, aby nie poparzyć się gorącymi przedmiotami.
- C) Upewnij się, że przedmioty są suche i gotowe do użycia.

5. Konserwacja sterylizatora:

- A) Po każdym użyciu, wyczyść komorę sterylizacyjną
- B) Przeprowadzaj regularne przeglądy sterylizatora, aby upewnić się, że jest on w dobrym stanie technicznym.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu