

Instrukcja użytkowania

Wózek na kółkach



Opis:

Wózek przeznaczony jest do magazynowania i przewożenia arkuszy specjalnego papieru do stanowisk pakowania materiałów i narzędzi przeznaczonych do sterylizacji w centralnych sterylizatorniach. Rama wózka oraz poręcz służące do wieszania na nich arkuszy papieru wykonane są ze stali nierdzewnej, która nadaje konstrukcji estetyczny wygląd i zapewnia wieloletnią trwałość. Mobilny wózek wyposażony jest w cztery kółka, w tym dwa koła z blokadą.

Instrukcja:

1. Rozpakuj wszystkie elementy z opakowania i upewnij się, że masz wszystkie części.
2. Połóż na ziemi dolny blat wózka i przypnij do niego koła za pomocą śrub i nakrętek. Upewnij się, że wszystkie koła są dobrze przypięte i wózek jest stabilny.
3. Następnie połóż na dolnym blacie wózka pionowe kolumny i zamocuj je do niego za pomocą śrub i nakrętek.
4. Umieść poziome belki na kolumnach i przypnij je za pomocą śrub i nakrętek. Upewnij się, że wszystkie belki są dobrze przypięte i wieszak jest stabilny.
5. Zamocuj wózek na belkach za pomocą specjalnych uchwytów, umieszczonych na końcach belki.
6. Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze przypięte i czy wieszak jest stabilny.

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzeń umyj wózek wodą z mydłem, a następnie zdezynfekuj.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu