

Instrukcja użytkowania

Stół do masażu sterowany za pomocą pilota



Opis:

Elektryczny stół do masażu wyróżnia się nowoczesnym, lekkim wzornictwem. Leżysko stołu zostało wykonane z gąbki o wysokiej gęstości i sprężystości, dzięki temu nie odkształca się. Całość leżanki pokryta została wodoodpornym materiałem co pomaga w utrzymaniu czystości i higieny.

Łóżko składa się z dwóch segmentów : zagłówek ze specjalnym wyciąganym elementem dopasowanym do wielkości twarzy ułatwiającym oddychanie pacjenta podczas zabiegu z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia oraz części przeznaczanej na dolną część ciała pacjenta.

Całość osadzona na solidnej podstawie. Wysokość stołu regulowana jest od 55 do 85cm.

Łóżko elektryczne idealnie sprawdzi się w gabinetach masażu, gabinetach rehabilitacyjnych, salonach urody, salonach tatuażu oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

Instrukcja:

1. Rozpakuj wszystkie elementy z opakowania i upewnij się, że masz wszystkie części.
2. Umieść dolny blat stołu na podłodze i przypnij do niego elektryczny system podnoszenia. Wszystkie elementy elektryczne powinny być dobrze umocowane.
3. Zamontuj nogi stołu do dolnego blatu za pomocą specjalnych śrub i nakrętek. Upewnij się, że wszystkie nogi są równomiernie rozłożone.
4. Umieść górną część stołu na nogach i przypnij ją za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
5. Zamocuj zagłówek do górnej części stołu za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
6. Przypnij podłokietniki do dolnej części stołu za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
7. Umieść poduszki na górnym blacie stołu, które będą używane podczas masażu.

8. Przetestuj elektryczny system podnoszenia, aby upewnić się, że działa poprawnie i płynnie.
9. Po każdym masażu zdezynfekuj stół, a gdy dojdzie do zabrudzeń umyj go przy pomocy wody z mydłem, lub popularnych domowych środków czystości. Miej na uwadze, aby nie zamoczyć elektrycznych części stołu.

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzeń umyj stół wodą z mydłem, a następnie zdezynfekuj. Uważaj na elektroniczne części.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu