

Instrukcja użytkowania

Składany stół do masażu



2-segmentowe łóżko do masażu to wysoki komfort pracy oraz wygoda dla osób poddawanych różnym zabiegom. Łatwa regulacja wysokości w zakresie 50-78 cm sprawi, że w mgnieniu oka dostosujemy ją do naszych wymagań. Powierzchnia użytkowa pokryta jest skórą ekologiczną, pod którą znajduje się gruba pianka zapewniająca miękkość. Dla zwiększenia komfortu łóżko zostało wyposażone w funkcjonalne dodatki takie jak: podłokietniki boczne, przedni podłokietnik, regulowany podgłówek w kształcie podkowy, kieszenie na kosmetyki, wieszak na ręcznik, w blacie stołu znajdziemy dodatkowy otwór na twarz.

Łóżko, wraz z dodatkami, które mieszczą się wewnątrz, składa się do formy walizki zamykanej na klamry. Całość wkładamy do dołączonego pokrowca transportowego, dzięki któremu możemy wygodnie się przemieszczać. Pokrowiec został dodatkowo wyposażony w pas na ramię.

Instrukcja

1. Rozpakuj wszystkie elementy z opakowania i upewnij się, że masz wszystkie części.
2. Umieść dolną część łóżka na podłodze i przypnij do niego nogi za pomocą specjalnych śrub i nakrętek. Upewnij się, że wszystkie nogi są równomiernie rozłożone.
3. Zamontuj górną część łóżka na nogach za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
4. Umieść zagłówek na górnej części stołu i przypnij go za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
5. Przypnij podłokietniki do dolnej części stołu za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
6. Umieść poduszki na górnym blacie stołu, które będą używane podczas masażu.
7. Przetestuj stabilność stołu i upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze przypięte.

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzeń umyj stół wodą z mydłem, a następnie zdezynfekuj.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu