

Instrukcja użytkowania

Mobilne krzesło do masażu



Krzesło do masażu ułatwia ustawienie ciała pacjenta w odpowiedniej pozycji co zdecydowanie sprzyja wykonaniu poszczególnych zabiegów m.in. masaż głowy, masaż szyi i masaż ramion. Krzesło jest solidnie wykonane, wytrzymałe obciążenie do 130 kg dzięki metalowemu stelażowi. Tapicerka wykonana jest z tworzywa PCV, co ułatwia utrzymanie go w czystości.

Mobilne krzesło do masażu idealnie sprawdza się przede wszystkim w gabinetach masażu, gabinetach fizjoterapeutycznych, gabinetach ortopedycznych, ośrodkach SPA, salonach tatuażu, salonach kosmetycznych oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

Instrukcja:

1. Rozpakuj wszystkie elementy z opakowania i upewnij się, że masz wszystkie części.
2. Umieść podstawę krzesła na podłodze i przypnij do niej kolumnę za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
3. Zamocuj siedzisko i oparcie do kolumny za pomocą specjalnych śrub i nakrętek. Upewnij się, że elementy są dobrze przypięte.
4. Przypnij podłokietniki do siedziska za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
5. Umieść zagłówek na górnym końcu kolumny i przypnij go za pomocą specjalnych śrub i nakrętek.
6. Przetestuj stabilność krzesła i upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze przypięte.
7. Krzesło do masażu jest gotowe do użytku. Możesz dostosować położenie zagłówka i podłokietników, aby uzyskać najlepszy komfort podczas masażu.

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzeń umyj stół wodą z mydłem, a następnie zdezynfekuj.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu