

Instrukcja użytkowania

Klin do masażu

**Opis:**

Klin do masażu o wymiarach 48x26x18 cm. Kliny do masażu są używane w celu podtrzymania i ustawienia ciała pacjenta w odpowiedniej pozycji podczas masażu lub terapii manualnej. Kliny mogą pomóc w zmniejszeniu napięcia mięśniowego, poprawie krążenia i redukcji bólu, poprzez odpowiednie ułożenie ciała.

Instrukcja:

Usuwanie brudu i kurzu:

a. Użyj odkurzacza lub miękkiej szczotki, aby usunąć kurz i brud z klina.

Czyszczenie plam i zabrudzeń:

Użyj wilgotnej szmatki lub gąbki, aby usunąć plamy i zabrudzenia z klina.

Dezynfekcja:

a. Użyj specjalnego środka dezynfekcyjnego, który jest przeznaczony do czyszczenia klinów do masażu.

b. Rozpyl środek dezynfekcyjny na powierzchnię klina i pozostaw go na kilka minut, aby zdezynfekować klin.

c. Następnie przetrzyj klin wilgotną szmatką, aby usunąć środek dezynfekcyjny.

Przechowywanie:

a. Upewnij się, że klin jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.

b. Przechowuj klin w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć powstawania pleśni i bakterii.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu