

Instrukcja użytkowania

Półwałek do masażu

**Opis:**

Półwałki do masażu o różnej wielkości dają możliwość dopasowania narzędzia do wykonywanych ćwiczeń. Wykonane są z usztywnianej pianki **odpornej na odkształcenia**, a powierzchnia nie niszczy się pod wpływem używania preparatów do dezynfekcji.

Kształtki rehabilitacyjne **zapewniają pełen relaks i rozluźnienie mięśni** pacjenta podczas terapii. Stosowane są pod kolana, kostki, brzuch oraz naturalne zgięcia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

60x7.5cm

Instrukcja:

Usuwanie brudu i kurzu:

a. Użyj odkurzacza lub miękkiej szczotki, aby usunąć kurz i brud z półwałka.

Czyszczenie plam i zabrudzeń:

Użyj wilgotnej szmatki lub gąbki, aby usunąć plamy i zabrudzenia z półwałka.

Dezynfekcja:

a. Użyj specjalnego środka dezynfekcyjnego, który jest przeznaczony do czyszczenia produktów do masażu

b. Rozpyl środek dezynfekcyjny na powierzchnię półwałka i pozostaw go na kilka minut, aby zdezynfekować półwałka.

c. Następnie przetrzyj półwałek wilgotną szmatką, aby usunąć środek dezynfekcyjny.

Przechowywanie:

a. Upewnij się, że półwałek jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.

b. Przechowuj półwałek w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć powstawania pleśni i bakterii.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu