

Instrukcja użytkowania

Kształtka rehabilitacyjna pod kończyny dolne z możliwością obracania pacjenta

**Opis:**

Kształtka rehabilitacyjna pod dwie kończyny dolne służy jako pomoc do przekręcania pacjenta. Specjalne uchwyty boczne pozwalają stabilnie złapać poduszkę i zmienić pozycję leżącego.

Kształtka wykonana jest z pianki. Jej powierzchnia została pokryta materiałem skóropodobnym przez co jest łatwa w utrzymaniu czystości i dezynfekcji.

Wymiary: 47 cm x 13 cm x 41 cm

Kształtka rehabilitacyjna znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

Instrukcja czyszczenia:

1. Przetrzyj powierzchnię rzeczy suchą szmatką lub szczotką, aby usunąć pył i brud.
2. Przygotuj roztwór wody i łagodnego mydła (np. płyn do mycia naczyń) w stosunku 1:10.
3. Zwilż gąbkę lub miękką szmatkę w roztworze mydła i wody, a następnie delikatnie przetrzyj powierzchnię rzeczy, unikając zbyt mocnego pocierania i tarcia.
4. Spłucz powierzchnię czystą wodą, aby usunąć pozostałości mydła.
5. Wyciśnij nadmiar wody i osusz powierzchnię miękką szmatką.
6. Pozwól rzeczy wyschnąć w temperaturze pokojowej, unikając źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub suszarki.
7. W przypadku plam, można użyć specjalnego środka czyszczącego przeznaczonego do skóropodobnych materiałów, ale należy upewnić się, że jest on odpowiedni dla konkretnego rodzaju materiału i wykonać próbę na niewidocznym fragmencie materiału przed użyciem na całej powierzchni.

Pamiętaj, że nie należy stosować silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię skóropodobnego materiału.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 527-277-46-98
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu