

Instrukcja użytkowania

Torba na sprzęt medyczny

**Opis:**

Torba do przenośnego zestawu przeznaczona do udzielania pierwszej pomocy w przypadku lekkich kontuzji. Po wyposażeniu umożliwi unieruchomienie złamań, uśmierzanie bólu, opatrywanie ran, zapewnienie izolacji termicznej oraz przeprowadzenie sztucznego oddychania.

Instrukcja czyszczenia:

1. Usuń z torby wszystkie przedmioty.
2. Wytrząśnij lub wybierz drobne cząstki brudu i pyłu.
3. Odkurz lub przetrzyj torbę odkurzaczem z węzłem lub miękką szczotką, aby usunąć brud i pył z powierzchni.
4. Zdejmij wszystkie odłączalne elementy, takie jak paski i kieszenie.
5. Przeczytaj metkę z instrukcją dotyczącą prania.
6. W przypadku trudnych do usunięcia plam, można użyć specjalnych środków do czyszczenia tkanin, które są dostępne w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego.
7. Po wyczyszczeniu torby, pozostaw ją w dobrze wentylowanym miejscu, aby wyschła. Nie susz torby w suszarce ani nie susz jej na słońcu, ponieważ to może spowodować skurczenie lub uszkodzenie materiału.
8. Zdezynfekuj torbę alkoholem izopropylowym z zachowaniem rozwagi, aby nie uszkodzić torby.

Pamiętaj, aby regularnie czyścić swoją materiałową torbę, aby utrzymać ją w czystości i w dobrym stanie. Czyszczenie torby zgodnie z powyższymi krokami pomoże zachować jej wygląd i trwałość na dłużej.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 527-277-46-98
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu