

## Instrukcja użytkowania

### Stanowisko do pobierania krwi

**Opis:**

**Stanowisko do pobierania krwi** to ergonomiczny i funkcjonalny element wyposażenia gabinetu lekarskiego. Fotel ma uniwersalne zastosowanie, może być przeznaczony do przeprowadzania iniekcji, pobierania krwi lub szczepień.

**Specjalistyczne krzesło** znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

**Instrukcja czyszczenia:**

1. Przeczyść krzesło z krwi, zacznij od odkurzenia krzesła, a następnie wytrzyj całe krzesło do pobierania krwi suchą szmatką lub papierowymi ręcznikami, aby usunąć wszelkie widoczne zanieczyszczenia.
2. Przygotuj roztwór dezynfekujący, który jest bezpieczny do użycia na powierzchniach medycznych. W tym celu możesz skorzystać z gotowych płynów do dezynfekcji, takich jak alkohol izopropylowy lub roztwór wybielający.
3. Zwilż szmatkę w roztworze dezynfekującym i delikatnie przetrzyj całą powierzchnię krzesła do pobierania krwi, aby zabić bakterie i wirusy.
4. Pozwól krzesłu do pobierania krwi na całkowite wyschnięcie przed ponownym użyciem.

Ważne jest, aby pamiętać, że czyszczenie stanowiska do pobierania krwi powinno być wykonywane regularnie, zgodnie z zasadami higieny medycznej.

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 527-277-46-98  
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu