

## Instrukcja użytkowania

### Chodzik rehabilitacyjny

**Opis:**

Chodzik ułatwiający przemieszczanie się osób o ograniczonej możliwości ruchowej, wyposażony został w dwa przednie kółeczka i dwie tylne stopki spełniające rolę hamulców. Lekka aluminiowa konstrukcja sprawia, że chodzik jest lekki co sprzyja jego przemieszczaniu, a łatwy system składania i mały rozmiar umożliwia przechowywanie urządzenia praktycznie w każdym miejscu.

**Instrukcja czyszczenia:**

1. Przygotuj roztwór myjący: możesz użyć łagodnego detergentu, takiego jak płyn do naczyń, lub specjalnego środka do czyszczenia metali. Rozcieńcz detergent lub środek do czyszczenia według instrukcji na opakowaniu, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Zdejmij wszelkie niezbędne części z chodzika, takie jak koła lub podpórki, aby umożliwić łatwiejsze czyszczenie.
3. Zwilż miękką gąbkę lub szmatkę w roztworze myjącym i delikatnie przetrzyj całą powierzchnię chodzika. Upewnij się, że dokładnie wyczyściłeś wszelkie trudno dostępne miejsca, takie jak narożniki i zaokrąglenia.
4. Spłucz chodzik wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.
5. Wycieraj chodzik suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, a następnie pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Nie używaj suszarki do włosów ani innych urządzeń, które mogą wpłynąć na temperaturę lub wilgotność, ponieważ może to spowodować uszkodzenie chodzika.
6. Przywróć wszystkie niezbędne części na swoje miejsca, upewniając się, że są dobrze zamocowane.

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 527-277-46-98  
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu