

## Instrukcja użytkowania

### Wózek inwalidzki napędzany ręcznie

**Opis:**

Wózek inwalidzki jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia przemieszczania się.

Wózek inwalidzki napędzany jest siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Zapewnia komfort oraz stabilność podczas jazdy. Siedzisko i oparcie wózka inwalidzkiego zostało wykonane z tworzywa odpornego na zanieczyszczenia, dzięki czemu z łatwością można utrzymać go w czystości.

**Instrukcja czyszczenia:**

1. Przygotuj roztwór myjący: możesz użyć łagodnego detergentu lub specjalnego środka do czyszczenia wózków inwalidzkich. Rozcień detergent lub środek do czyszczenia według instrukcji na opakowaniu, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Usuń siedzisko oraz wszelkie niezbędne części z wózka, takie jak podnóżki, podłokietniki lub pasy bezpieczeństwa. Następnie dokładnie je przetrzyj.
3. Zwilż miękką gąbkę lub szmatkę w roztworze myjącym i delikatnie przetrzyj całą powierzchnię wózka, włącznie z ramą, kółkami i uchwytami. Staraj się dokładnie oczyścić wszystkie trudno dostępne miejsca.
4. Spłucz wózek wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.
5. Wycieraj wózek suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, a następnie pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Nie używaj suszarki do włosów ani innych urządzeń, które mogą wpłynąć na temperaturę lub wilgotność, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wózka.
6. Przywróć wszystkie niezbędne części na swoje miejsca, upewniając się, że są dobrze zamocowane i nie ma luzów.

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 527-277-46-98  
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu