

## Instrukcja użytkowania

### Pas do transferu

**Opis:**

**Pas transferowy** umożliwia wygodne przemieszczenie pacjenta bez konieczności chwytania go za ubranie lub części ciała, które mogły ulec osłabieniu. Dzięki temu niweluje niepotrzebny dyskomfort i znacznie usprawnia całą czynność.

Pas transferowy to duże udogodnienie dla pacjenta i opiekuna, a dzięki czterem rozmiarom można idealnie dopasować wersję do własnych potrzeb.

**Specjalistyczny pas do transferu** znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

**Instrukcja:**

1. Przygotuj roztwór myjący: możesz użyć łagodnego detergentu lub specjalnego środka do czyszczenia pasów transferowych. Rozcieńcz detergent lub środek do czyszczenia według instrukcji na opakowaniu, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Rozluźnij paski i przepaski i zdejmij je z metalowych zamków.
3. Zwilż miękką gąbkę lub szmatkę w roztworze myjącym i delikatnie przetrzyj całą powierzchnię pasa transferowego, włącznie z paskami, przepaskami i metalowymi zamkami. Staraj się dokładnie oczyścić wszystkie trudno dostępne miejsca.
4. Spłucz pas transferowy wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.
5. Wycieraj pas transferowy suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, a następnie pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

Po dokładnym wyschnięciu, zapięcia na pasie transferowym można przesmarować kroplą oleju silikonowego, aby ułatwić ich działanie.

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 527-277-46-98  
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu