

## Instrukcja użytkowania

### Ślizg do przenoszenia pacjenta

**Opis:**

Maty ślizgowe do przesuwania pacjenta to nieoceniona pomoc podczas codziennej pielęgnacji osób niesamodzielnych z ograniczoną sprawnością ruchową. Zdecydowanie poprawia jakość opieki nad osobą chorą i pozwala odciążyć kręgosłup. Wykonane są z bardzo śliskiej wodoodpornej i wytrzymałej na tarcie tkaniny, która optymalizuje czynności.

**Specjalistyczna mata do transferu** znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

**Instrukcja:**

1. Wstrząśnij matą, aby usunąć z niej pył i brud.
2. Przygotuj roztwór myjący: możesz użyć łagodnego detergentu lub specjalnego środka do czyszczenia mat do przenoszenia chorych. Rozcieńcz detergent lub środek do czyszczenia według instrukcji na opakowaniu, w zależności od stopnia zabrudzenia.
3. Zwilż miękką gąbkę lub szmatkę w roztworze myjącym i delikatnie przetrzyj całą powierzchnię maty, starając się dokładnie oczyścić wszystkie trudno dostępne miejsca.
4. Spłucz matę wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.
5. Wycieraj matę suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym
6. W przypadku trudnych plam lub zabrudzeń, które nie zostały usunięte za pomocą łagodnego detergentu, można spróbować usunąć je za pomocą specjalnego środka czyszczącego lub plamoodpornego.

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 527-277-46-98  
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu