

Instrukcja użytkowania

Mobilna lampa lupa

**Opis:**

Lampa bezcieniowa na statywie czteroramiennym osadzona jest na czterech jezdnych kółkach. Posiada dużą widoczność, szkło antyrefleksyjne i świetlówkę.

Stosowana jest przy zabiegach manicure i pedicure, makijażu permanentnym, epilacji.

Idealnie nadaje się do gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych oraz w wielu innych branżach.

Instrukcja składania:

1. Przygotuj wszystkie części - przed rozpoczęciem składania, upewnij się, że masz wszystkie potrzebne elementy. Rozłóż wszystkie części na płaskiej powierzchni.

Zamontuj kółka – zamontuj kółka na podstawie przy pomocy śrub i nakrętek.

Złożenie podstawy - połącz elementy podstawy lampy z ramą.

Przymocowanie słupa lampy - połącz słup lampy ramieniem lampy.

Montaż lampy - zamocuj elementy oświetleniowe na szczycie słupa lampy.

Testowanie i regulacja - po złożeniu lampy na kołach, dokładnie przetestuj ją, upewniając się, że wszystko działa poprawnie. W razie potrzeby wykonaj regulacje, takie jak dopasowanie poziomu lampy lub ustawienie jej kierunku.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu